

사용설명서

케어센스[®] 프로

Blood Glucose Monitoring System

- 정맥혈 및 모세혈 사용 가능
(GDH-FAD 검사지)
- 2.5인치 대화면
- 간편한 검사지 배출



i·sens

제조업자: (주)아이센스원주공장
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94-1
고객상담실: 080-910-0600
www.i-sens.com

© 2018 i-SENS, Inc. All Rights Reserved. PGUAA-0000038 REV0 2018/12



차례

정보

1. 주요정보	3
2. 제품사양	5
3. 케어센스 프로 혈당측정시스템	6
4. 건전지 교체	7
5. 혈당측정기의 청소 및 보관	8
6. 케어센스 프로 검사지	9
7. 케어센스 프로 혈당측정기	11
8. 케어센스 프로 혈당측정기 화면	12

준비

9. 혈당측정기 설정	13
시간 설정	13
알림음 설정	16
검사지 사용기한 알림 설정	17
저혈당(HYPo) 알림 설정	18
10. 검사지 사용기한 설정	19

측정

11. 혈당 측정	20
채혈기 준비	21
측정기와 검사지 준비	23
혈액주입	23
대체부위 측정 (AST)	28
12. Hi, Lo 메시지	30
13. 혈당 관리: 당뇨병의 진단기준	31
14. 혈당측정결과 전송	31

부가기능

15. 메모리 기능	32
16. 알람 설정	35

관리

17. 에러메시지	38
18. 문제해결	40
19. 케어센스 프로 제조자 정보	41



평생 무상 보증



(주)아이센스는 케어센스 프로 제품 구입 후 측정기에 이상이 있을 경우 평생 무상 수리 또는 교환 제도를 실시하고 있습니다.

평생 무상 수리 또는 교환 서비스를 받으시려면 제품 구입 후 보증교환등록카드를 작성하여 우편으로 발송하여 주시기 바랍니다.

사용 중 문의사항은 (주)아이센스 고객센터 (080-910-0600) 또는 케어센스 제품 홈페이지 (www.caresens.co.kr)로 연락하시기 바랍니다.

- 보증교환등록카드는 온라인으로도 등록 가능합니다.

〈온라인 등록 방법〉

케어센스 제품 홈페이지 (www.caresens.co.kr)

- ➔ 고객만족센터
- ➔ 무상보증등록