

사용설명서

케어센스[®] N 에코

Blood Glucose Monitoring System

- 아이콘을 이용한
혈당목표관리
- 간편한 검사지 배출
- 1,000개의 대용량 메모리



혈당관리 아이콘



i·sens

제조사: (주)아이센스원주공장
 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94-1
 고객센터: **080-910-0600**
 www.i-sens.com

차례

정보

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 주요정보 | 3 |
| 2. 제품사양 | 5 |
| 3. 케어센스 N 에코 혈당측정시스템 | 6 |
| 4. 건전지 교체 | 7 |
| 5. 혈당측정기의 청소 및 보관 | 8 |
| 6. 케어센스 N 검사지 | 9 |
| 7. 케어센스 N 에코 혈당측정기 | 11 |
| 8. 케어센스 N 에코 혈당측정기 화면 | 12 |

준비

| | |
|-----------------|----|
| 9. 혈당측정기 설정 | 13 |
| 시간 설정 | 13 |
| 알림음 설정 | 16 |
| 검사지 사용기한 알림 설정 | 17 |
| 저혈당(Lo) 알림 설정 | 18 |
| 고혈당(Hi) 알림 설정 | 19 |
| 10. 검사지 사용기한 설정 | 20 |

측정

| | |
|---------------------|----|
| 11. 혈당 측정 | 21 |
| 채혈기 준비 | 22 |
| 측정기와 검사지 준비 | 24 |
| 혈액주입 | 24 |
| 대체부위 측정 (AST) | 29 |
| 대체부위 채혈 (손바닥, 팔뚝) | 29 |
| 12. Hi, Lo 메시지 | 31 |
| 13. 혈당관리: 당뇨병의 진단기준 | 32 |
| 14. 혈당측정결과 전송 | 32 |

부가기능

| | |
|------------|----|
| 15. 메모리 기능 | 33 |
| 16. 알람 설정 | 36 |

관리

| | |
|----------------------|----|
| 17. 에러메시지 | 39 |
| 18. 문제해결 | 41 |
| 19. 케어센스 N 에코 제조자 정보 | 42 |

평생 무상 보증

(주)아이센스는 케어센스 N 에코 제품 구입 후 측정기에 이상이 있을 경우 평생 무상 수리 또는 교환 제도를 실시하고 있습니다. 평생 무상 수리 또는 교환 서비스를 받으시려면 제품 구입 후 보증교환등록카드를 작성하여 우편으로 발송하여 주시기 바랍니다. 사용 중 문의사항은 (주)아이센스 고객센터 (080-910-0600) 또는 케어센스 제품 홈페이지 (www.caresens.co.kr)로 연락하시기 바랍니다.

- 보증교환등록카드를 온라인으로도 등록 가능합니다.

〈온라인 등록 방법〉

케어센스 제품 홈페이지 (www.caresens.co.kr)

➡ 고객만족센터 ➡ 무상보증등록

- 이 문서는 (주)아이센스의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태나 방식으로도 복제 될 수 없습니다.
- 이 문서는 발행 시점을 기준으로 작성되었으며 아이센스의 문서 개선 정책에 의거하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.