



체계적인 혈당 관리를 위해
'스마트로그'를 사용하세요!
(QR 코드 앱을 사용하면
손쉽게 확인 가능합니다.)

i·sens

제조사: (주)아이센스원주공장
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94-1
고객상담실: 080-910-0600
www.i-sens.com

© 2019 i-SENS, Inc. All Rights Reserved. PGA1K3097 REV4 2019/08

의료기기

i·sens

사용설명서

케어센스[®] **N** NFC

Blood Glucose Monitoring System

- NFC 통신을 이용한
혈당값 무선 전송 기능
- 체계적인 혈당 관리를 위한
다양한 식사 심볼
- 저혈당 알림 기능



CoreSignal[®] Technology
믿을 수 있는 정확도! 아이센스만의 특허 기술이 만듭니다.

차례

정보

1. 주요정보	3
2. 제품사양	5
3. 케어센스 N NFC 혈당측정시스템	6
4. 건전지 교체	7
5. 혈당측정기의 청소 및 보관	8
6. 케어센스 N 검사지	9
7. 케어센스 N NFC 혈당측정기	11
8. 케어센스 N NFC 혈당측정기 화면	12

준비

9. 혈당측정기 설정	13
시간 설정	13
알림음 설정	16
검사지 사용기한 알림 설정	17
저혈당(HYPo) 알림 설정	18
10. 검사지 사용기한 설정	19

측정

11. 혈당 측정	20
채혈기 준비	21
측정기와 검사지 준비	23
혈액주입	24
대체부위 측정 (AST)	28
대체부위 채혈 (손바닥, 팔뚝)	28
12. Hi, Lo 메시지	30
13. 혈당관리: 당뇨병의 진단기준	31
14. 혈당측정결과 전송	31
NFC 전송	31
케이블전송	33

부가기능

15. 메모리 기능	34
16. 알람 설정	37
식후 2시간 알람(PP2알람) 설정	37
특정시간 알람 (alarm1-3) 설정	38

관리

17. 에러메시지	40
18. 문제해결	42
19. 케어센스 N NFC 제조자 정보	43

평생 무상 보증

(주)아이센스는 케어센스 N NFC 제품 구입 후 측정기에 이상이 있을 경우 평생 무상 수리 또는 교환 제도를 실시하고 있습니다. 평생 무상 수리 또는 교환 서비스를 받으시려면 제품 구입 후 보증교환등록카드를 작성하여 우편으로 발송하여 주시기 바랍니다.

사용 중 문의사항은 (주)아이센스 고객센터실 (080-910-0600) 또는 케어센스 제품 홈페이지 (www.caresens.co.kr) 로 연락하시기 바랍니다.

- 보증교환등록카드는 온라인으로도 등록 가능합니다.

〈온라인 등록 방법〉

- 케어센스 제품 홈페이지 (www.caresens.co.kr)
- ➡ 고객만족센터 ➡ 무상보증등록

- 이 문서는 ㈜아이센스의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태나 방식으로 복제 될 수 없습니다.
- 이 문서는 발행 시점을 기준으로 작성되었으며 아이센스의 문서 개선 정책에 의거하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.