

의료기기


i·sens

사용설명서

케어센스[®] N 팝

Blood Glucose Monitoring System

- 어두운 곳에서도
선명한 백라이트 화면
- 저혈당 알림 기능
- 1,000개의 메모리

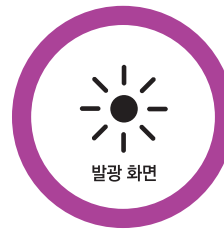

발광 화면



i·sens

제조사: (주)아이센스원주공장
 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94-1
 고객센터: 080-910-0600

www.i-sens.com

© 2018 i-SENS, Inc. All Rights Reserved. PGA1K3102 REV3 2018/12

 CoreSignal[®] Technology
 믿을 수 있는 정확도! 아이센스만의 특허 기술이 만듭니다.

차례

정보

1. 주요정보	3
2. 제품사양	5
3. 케어센스 N 팝 혈당측정시스템	6
4. 건전지 교체	7
5. 혈당측정기의 청소 및 보관	8
6. 케어센스 N 검사지	9
7. 케어센스 N 팝 혈당측정기	11
8. 케어센스 N 팝 혈당측정기 화면	12

준비

9. 혈당측정기 설정	13
시간 설정	13
알림음 설정	16
검사지 사용기한 알림 설정	17
저혈당(HYPo) 알림 설정	18
10. 검사지 사용기한 설정	19

측정

11. 혈당 측정	20
채혈기 준비	21
측정기와 검사지 준비	23
식후혈당측정결과 표시	23
혈액주입	24
대체부위 측정(AST)	27
12. H, Lo 메시지	29
13. 혈당관리: 당뇨병의 진단기준	30
14. 혈당측정결과 전송	30

부가기능

15. 메모리 기능	31
16. 식후 2시간 알림(PP2알림) 설정	34

관리

17. 에러메시지	35
18. 문제해결	37
19. 케어센스 N 팝 제조자 정보	38

평생 무상 보증

(주)아이센스는 케어센스 N 팝 제품 구입 후 측정기에 이상이 있을 경우 평생 무상 수리 또는 교환 제도를 실시하고 있습니다.

평생 무상 수리 또는 교환 서비스를 받으시려면 제품 구입 후 보증교환등록카드를 작성하여 우편으로 발송하여 주시기 바랍니다.

사용 중 문의사항은 (주)아이센스 고객센터(080-910-0600) 또는 케어센스 제품 홈페이지(www.caresens.co.kr)로 연락하시기 바랍니다.

- 보증교환등록카드는 온라인으로도 등록 가능합니다.

〈온라인 등록 방법〉

케어센스 제품 홈페이지(www.caresens.co.kr)

➡ 고객만족센터 ➡ 무상보증등록

- 이 문서는 ㈜아이센스의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태나 방식으로 복제 될 수 없습니다.
- 이 문서는 발행 시점을 기준으로 작성되었으며 아이센스의 문서 개선 정책에 의거하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.