



지원하는 기기 확인 및  
스마트로그 앱 다운로드  
(QR 코드 앱을 사용하면  
손쉽게 확인 가능합니다.)

[www.caresens.co.kr/smartlog](http://www.caresens.co.kr/smartlog)

**i·sens**

제조사: (주)아이센스원주공장  
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94-1  
**고객상담실: 080-910-0600**  
[www.i-sens.com](http://www.i-sens.com)

© 2019 i-SENS, Inc. All Rights Reserved. PGL6K0102 REV1 2019/08

의료기기

**i·sens**

사용설명서

# CareSens® Dual

Blood Glucose Monitoring System  
Blood β-Ketone Monitoring System

- 혈중베타케톤 검사 가능
- 블루투스 통신을 이용한  
측정값 무선 전송
- 2.5인치 백라이트 대화면
- 간편한 검사지 배출



 **CoreSignal® Technology**  
믿을 수 있는 정확도! 아이센스만의 특허 기술이 만듭니다.

## 블루투스® 무선통신 기술

블루투스® 무선통신 기술은 일부 스마트폰을 비롯한 다양한 기기에서 사용됩니다. 케어센스® 듀얼 혈당측정기는 블루투스 기술을 사용하여 여러분의 스마트폰에 혈당측정값을 전송합니다. 케어센스 듀얼 혈당측정기를 스마트폰과 페어링\*하여 여러분의 혈당을 관리하시기 바랍니다.

케어센스 듀얼 혈당측정기는 스마트로그™ 모바일 앱(어플리케이션)과 연동됩니다. 블루투스 연결 전에 스마트폰의 앱 스토어에서 스마트로그 모바일 앱을 먼저 다운로드 받아 설치하십시오.

\* 페어링(Pairing): 두개의 블루투스 기기 간에 무선 연결을 생성하는 절차로 핀(PIN) 넘버를 교환하는 과정이 포함될 수 있습니다. 최초 연결 시 한 번만 발생하는 인증 절차로, 이후에는 두 기기 간 연결이 자동으로 인증됩니다.

**경고:** 병원이거나 비행기 등 스마트폰 사용이 허가되지 않는 장소에서는 블루투스 통신을 꺼야 합니다.

**참고:** 스마트로그 모바일 앱을 사용할 수 없는 스마트폰이 있을 수 있습니다.

## 등록상표권

블루투스® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 (주)아이센스의 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

## 평생 무상 보증

(주)아이센스는 케어센스 듀얼 제품 구입 후 측정기에 이상이 있을 경우 평생 무상 수리 또는 교환 제도를 실시하고 있습니다. 평생 무상 수리 또는 교환 서비스를 받으시려면 제품 구입 후 보증교환등록카드를 작성하여 우편으로 발송하여 주시기 바랍니다.

사용 중 문의사항은 (주)아이센스 고객센터 (080-910-0600) 또는 케어센스 제품 홈페이지 ([www.caresens.co.kr](http://www.caresens.co.kr))로 연락하시기 바랍니다.

• 보증교환등록카드는 온라인으로도 등록 가능합니다.

〈온라인 등록 방법〉

케어센스 제품 홈페이지 ([www.caresens.co.kr](http://www.caresens.co.kr))

➔ 고객만족센터 ➔ 무상보증등록

- 이 문서는 (주)아이센스의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태나 방식으로도 복제 될 수 없습니다.
- 이 문서는 발행 시점을 기준으로 작성되었으며 아이센스의 문서 개선 정책에 의거하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.