

i·sens

제조업자: (주)아이센스  
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94-1  
고객상담실: 080-910-0600  
www.i-sens.com

© 2019 i-SENS, Inc. All Rights Reserved. PGUAA-0000127 REV0 2019/11


동물용 의료기기

사용설명서

# VETMATE™

동물용 혈당측정기

i·sens

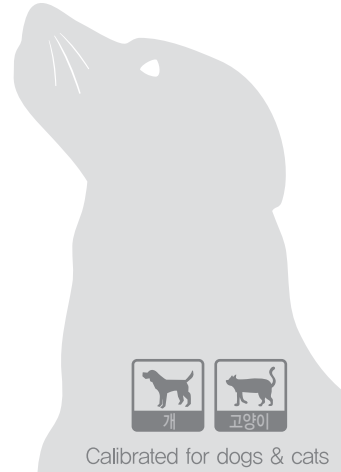

**GDH-FAD**  
정맥혈 및 모세혈 사용



**Used Strip Ejector**  
간편한 검사지 배출



**Auto Backlighting LCD**  
보기 쉬운 백라이트 화면

# 차례

## 정보

1. 주요정보	3
2. 제품사양	4
3. 벤티메이트 혈당측정시스템	5
4. 건전지 교체	6
5. 혈당측정기의 청소 및 보관	7
6. 벤티메이트 검사지	8
7. 벤티메이트 혈당측정기	10
8. 벤티메이트 혈당측정기 화면	11

## 준비

9. 혈당측정기 설정	12
시간 설정	12
알림음 설정	14
동물 설정	15
저혈당(HYPo) 알림 설정	16
'측정값 초기화'(저장된 측정결과 지우기)	16

## 측정

11. 혈당 측정	18
채혈기 준비	19
측정기와 검사지 준비	21
혈액주입	22
12. Hi, Lo 메시지	26
13. 혈당측정결과 전송	27

## 부가기능

14. 메모리 기능	28
저장된 측정치 평균값 보기	28
저장된 측정결과 보기	29
특정시간 알림 (alarm 1-5) 설정	30

## 관리

15. 에러메시지	32
16. 문제해결	34
17. 벤티메이트 제조자 정보	35

# 평생 무상 보증

(주)아이센스는 벤티메이트 제품 구입 후 측정기에 이상이 있을 경우 평생 무상 수리 또는 교환 제도를 실시하고 있습니다. 평생 무상 수리 또는 교환 서비스를 받으시려면 제품 구입 후 보증교환등록카드를 작성하여 우편으로 발송하여 주시기 바랍니다.

사용 중 문의사항은 (주)아이센스 고객센터 (080-910-0600) 또는 케어센스 제품 홈페이지 ([www.caresens.co.kr](http://www.caresens.co.kr)) 로 연락하시기 바랍니다.

- 보증교환등록카드는 온라인으로도 등록 가능합니다.

### <온라인 등록 방법>

케어센스 제품 홈페이지 ([www.caresens.co.kr](http://www.caresens.co.kr))

➡고객만족센터 ➡무상보증등록

- 이 문서는 (주)아이센스의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태나 방식으로 복제 될 수 없습니다.
- 이 문서는 발행 시점을 기준으로 작성되었으며 아이센스의 문서 개선 정책에 의거하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.